

Manuale per la Capo Sala Incontinenza		SUBJECT: Igiene personale del paziente POLICY NUMBER: PAGE 1 of 2	
APPROVED BY:		GENERATED BY:	
APPROVED BY:		APPROVED BY:	
ISSUED:	REVISED:	REVIEWED:	REFERENCE:

Standard of Care: #7905-X Comfort Shield® Barrier Washcloths Multi-Use Pack (8 (teli per busta.)

Utilizzo:

Comfort Shield Barrier Cloths possono essere usati su pazienti che sono incontinenti di feci/urina e devono essere usati solo per la cura nell'incontinenza.

Comfort Shield Barrier Cloths non deve essere usato se il paziente rifiuta o se è allergico ai suoi componenti o per ogni altra controindicazione. Personale qualificato ha la responsabilità di decidere se Comfort Shield Barrier Cloths può essere o meno utilizzato per quell paziente

Obbiettivo:

Aiutare a trattare e prevenire dermatitis perineali, proteggere la pelle da irritazioni associate a dermatiti perineali, pulire, idratare, deodorare e creare per la pelle una barriera protettiva all' umidità.

Materiale necessario:

1. #7905-X Comfort Shield® Barrier Cloths Multi-Use Pack
2. #7599 Contenitore per Comfort Shield da tenere accanto al letto del paziente.

PROCEDURE:

Comfort Shield può essere usato a temperatura ambiente, o scaldato per un maggiore comfort del paziente vedere la sezione

A. Pulizia della pelle:

- 1) Comunicare al paziente cosa andrete a fare continuando durante le operazioni di lavaggio
- 2) Rimuovere il tessuto umido sottostante il paziente
- 3) Se necessario rimuovere dolcemente la maggior parte di materiale fecale con panno o salviettina.
- 4) Alzare la linguetta della confezione di Comfort Shield.
- 5) Pulire l'area perianale con il numero necessario di telini Comfort Shield Barrier Cloth per rimuovere e pulire accuratamente da feci e urine la pelle . gettare I telini secondo il protocollo. NON gettare I telini nello scarico della toilette.
- 6) Ispezionare l'area perineale per verificare dermatiti associate a incontinenza o altri problemi della pelle.
- 7) Posizionare un lenzuolo pulito e asciutto sotto il paziente .
- 8) Riportare ogni cambiamento della pelle alla Caposala al termine della pulizia della cute.
- 9) Ripetere l'operazione dopo ogni episodio di incontinenza fecale o urinaria.

B. Riscaldamento del #7905-X Comfort Shield Barrier Cloths in A 1000-watt microwave:

- 1) Leggere le indicazioni sulla busta.
- 2) Aprire la busta prima di metterla nel forno amicoonde.
- 3) Scaldare per non più di 45 sec.

le informazioni qui contenute riguardano specificamente la pulizia della regione perineale/sacraledi persone incontinenti con Comfort Shield Barrier Cloths. Se Comfort Shield viene scaldato verificare le istruzioni sul la busta., testare prima di utilizzare il telino la sua temperatura sentendolo sulla pelle. NON usare il panno se è troppo caldo, ricordarsi che I guanti diminuiscono sensibilmente la temperatura reale. Fare particolarmente attenzione alla pelle dei neonati e alla persono non-coscienti