

<b>Manuale per la Caposala</b> Pulizia della testa		SUBJECT: Igiene personale del paziente POLICY NUMBER: PAGE 1 of 1	
APPROVED BY:		GENERATED BY:	
APPROVED BY:		APPROVED BY:	
ISSUED:	REVISED:	REVIEWED:	REFERENCE:

Procedura suggerita per la pulizia dei capelli con Comfort Rinse-Free Shampoo Cap with Conditioner #7409-X

**Utilizzo:**

Comfort Rinse-Free Shampoo Cap con Balsamo può essere usato per lavare e ammorbidire I capelli del paziente secondo le sue necessità giornalmente o settimanalmente. Comfort Hair è da utilizzare solo come parte del sistema completo del lavaggio del paziente.

**Materiale necessario:**

- Una busta di Comfort Rinse-Free Shampoo Cap with Balsamo (monouso,monopaziente).
- Salvietta.

**Procedure:**

Leggere le istruzioni sulla busta.

- A. Scaldare la busta se necessario anche in forno a microonde:
  1. Prima di scaldarla aprire la busta senza rimuovere il contenuto.
  2. Scaldarla per non più di 30 sec. Verificare sulla pelle prima di porre la cuffia sul capo del paziente. Ricordare che I guanti diminuiscono il reale calore. Fare molta attenzione ai soggetti sensibili e ai pazienti non collaboranti.
- B. Il calore è un ulteriore comfort per il paziente, il prodotto può essere usato anche a temperatura ambiente.
- C. Mettere la cuffia sulla testa del paziente. Per capelli lunghi , raccogliarli sul capo e posizionargli sopra la cuffia. Massaggiare gentilmente la testa per saturare di liquido i capelli. Rimuovere la cuffia e gettarla . Asciugare I capelli bagnati prima con una salvietta poi utilizzare il phon.
 

Il tempo di massaggio dipende dalla lunghezza dei capelli, dalla quantità e dal loro stato.

  - Capelli corti / fini: Circa 1 to 2 minuti.
  - Capelli lunghi e grossi: Circa 2 to 3 minuti.

NOTE: La salvietta può inoltre essere necessaria per togliere l'eccesso di gel, sangue o sporco prima di usare il prodotto.

*Le informazioni qui contenute riguardano specificamente la pulizia con Comfort Rinse Free Shampoo Cup. Se il prodotto viene scaldato verificare le istruzioni sul la busta., testare prima di utilizzare la cuffia verificando la sua temperatura sulla pelle. NON usare la cuffia se è troppo calda, ricordarsi che I guanti diminuiscono sensibilmente la temperatura reale.*